



Požadavky na instalační přípojky pro přístroj VAPOFIX 603:

El. přívod:	3x400 V TN-C-S, CYKY 5Cx4 (15 kW 3L+N+PE). Přívod zakončen acidur. krabicí umístěnou na zdi dle nákresu. Z rozvaděče připojeno přes proudový chránič 25A, vybavovací proud 30mA (B/3/25A). Zásuvka 230V/10A pro napájení úpravny vody CYKY 3C x 2,5 (B/1/16A). Před instalací samotného přístroje je nutné, aby byla provedena VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY pro sterilizátor dle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)	VAPOFIX 603 (2x)	SCHEREX
Odpad:	Dva vývody ze zdi dle schématu, PVC potrubí \varnothing 50mm s vnitřním gum. těsněním. Odpad pro přístroj a úpravnu musí být proveden tak, aby proud vody (ve fázi regenerace vody v úpravně) nebyl přetlačován zpětně do zásobní nádržky sterilizátoru (dostatečnost odpadu). Maximální výška 100mm nad zemí u vývodu musí být bezpodmínečně dodržena!!		Telefon: 0602/506 244 0602/556 410
Napájecí voda:	Vývod ze zdi, zakončení 1/2" (rohovým) kulovým ventilem s vnějším závitem. Tlak vody (trvale!) min. 3 bary, teplota do 15°C.		Datum: 31.5.2004